

# Skut-0

## Mascarilla reutilizable y lavable

Homologadas con alta eficacia a la filtración bacteriana (BFE)

Mascarillas higiénicas, lavables y reutilizables para adultos según **UNE 0065:2020**.

Homologada según el ensayo **2020TM2032** del laboratorio AITEX, resultados según la norma **UNE EN 14683:2019+A-C:2019**:

- **92% de eficacia de la filtración bacteriana (BFE)**
- **29 Pa/cm<sup>2</sup> de presión diferencial (respirabilidad)**.

Garantizadas un mínimo de 20 ciclos de lavado y secado, en las condiciones indicadas por el Ministerio de Sanidad, según **informe de ensayo 2020TM2213 de AITEX**.

Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara. Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda.



100% Polyester (PES)



En caso de reutilización recomendamos lavarlas como mínimo a 60°C.



Reutilizable y lavable



29Pa/cm<sup>2</sup> Respirabilidad



92% Filtración (BFE)



3 capas de poliéster




Comfortable y adaptable

## ¿Cómo atar tu mascarilla Skut con tiras ajustables?

Tanto el tejido de poliéster como las tiras ajustables de las mascarillas Skut tienen elasticidad, así que **son comodísimas y se adaptan a todo tipo de tallas**, personas y usos.

Puedes atarlas de la forma básica, dos nudos en cabeza y cuello. Si utilizas audífonos, esta es la forma indicada.

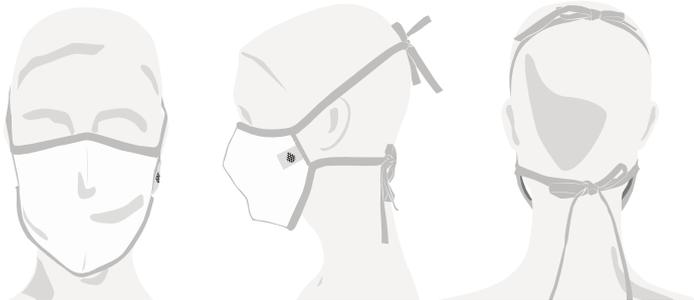


Si prefieres que la mascarilla quede **sujeta a las orejas**, sigue estos sencillos pasos. Las tiras son elásticas así que será comodísimo.




### Paso 1:

Haz un nudo detrás de una oreja

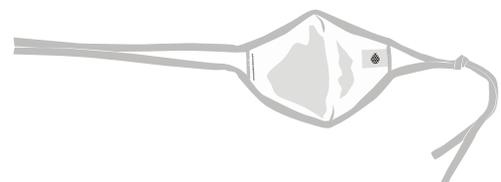


### Paso 2:

Haz un nudo detrás de la otra oreja

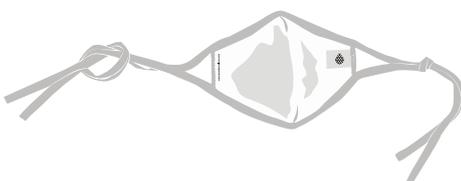

### Paso 3:

Haz un nudo en el extremo de las tiras

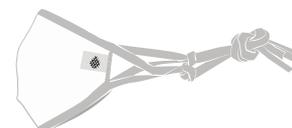


info@arpe.es | www.arpebarcelona.com | +34 93 793 76 77



# Skut-0

## Mascarilla reutilizable y lavable

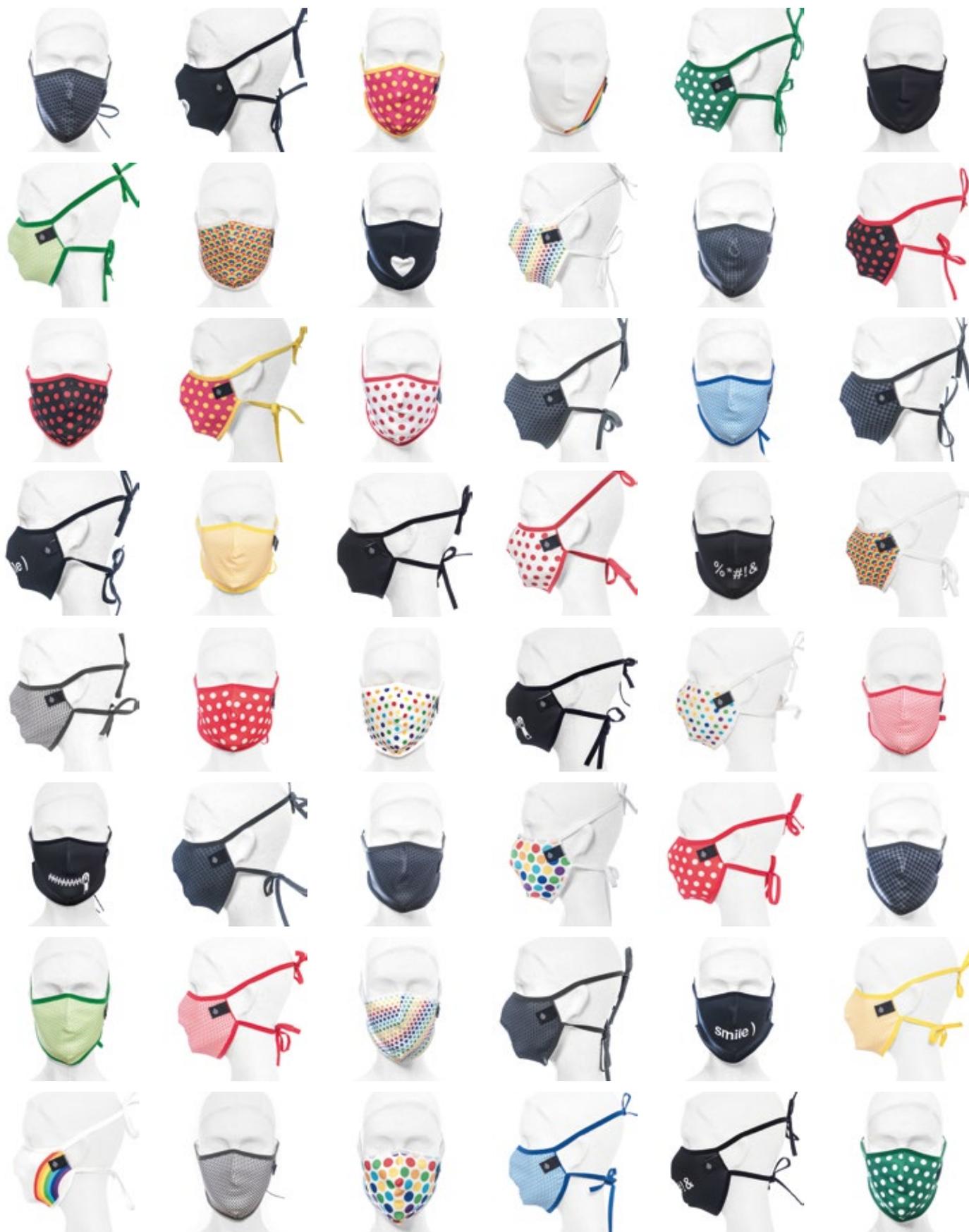

**Arpe Barcelona**®

info@arpe.es | www.arpebarcelona.com | +34 93 793 76 77

